


## 残留ガスの除去方法

ガスボンベを本体から外しても構造上本体内部にガスが残留します。残留ガスが過度に溜まると炎が安定しなくなります。炎が安定しない場合や使用後は次の手順に従って本体から内部に残留したガスを除去して下さい。

1. セフティーロックを『S'LOCK』側 (緑色が見える状態) にして下さい。
2. 本体からガスボンベと電池を外して下さい。
3. 本体からガスが放出されますので周囲の安全を確認し、十分換気をして下さい。
4. 本体上部にある『リリーサー』を本体から引き抜いて下さい。
5. コネクタ中心部分をリリーサーで押しして下さい。その時本体内部に残留しているガスが放出されます。『シュー』という音がしなくなるまで押し続けて下さい。
6. リリーサーを元の場所に戻したら残留ガスの除去作業は終了です。

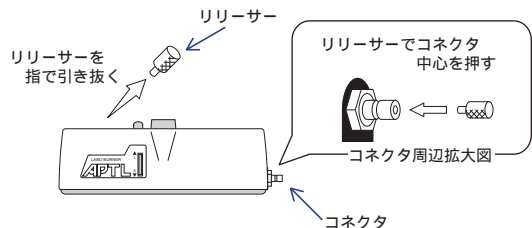

## 故障？と思ったら

スパークしない (着火用の火花が出ない)

- ・乾電池をチェックして下さい。(古くなっていませんか？入れる方向は合っていますか？)

スパークするが、着火しない

- ・ガスボンベの残量はありますか？
- ・ガスボンベの接続は正しく出来ていますか？もう一度接続し直して下さい。(『使用方法』の「ガスボンベの取り付け」を参照)
- ・プッシュボタンを押すとガスは出ていますか？火力が強過ぎたり、弱過ぎると安定した炎が得られない場合があります。火力を調節して下さい。(『使用方法』の「火力を調節する」を参照)

着火するが、炎が安定しない

- ・火力が強過ぎたり、弱過ぎると安定した炎が得られない場合があります。火力を調節して下さい。(『使用方法』の「火力を調節する」を参照)
- ・残留ガスが溜まり過ぎていると安定した炎が得られない可能性があります。本体内部の残留ガスを除去して下さい。(『残留ガスの除去方法』参照)
- ・ガスボンベの接続は正しく出来ていますか？もう一度接続し直して下さい。(『使用方法』の「ガスボンベの取り付け」を参照)

LABO BURNER  
**APT L**®


## 取扱説明書

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
本製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずこの『取扱説明書』をお読みください。  
そして、大切に保管してください。

株式会社 **フェニックスデント**

〒158-0091 東京都世田谷区中町5-38-3  
TEL 03-3702-8573

## 各部の名称

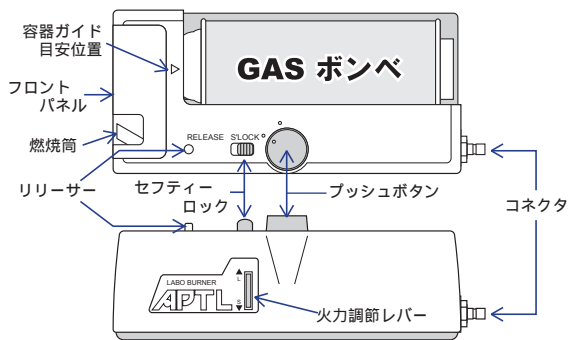

## 特に注意して頂きたい事

本製品は可燃性ガスを使用し高温の炎を発生しますので、火傷・火災に十分注意して下さい。本体を移動する時は必ず電池・ガスポンペを外しセフティーロックを『S'LOCK』側にして下さい。可燃物・引火性の高い薬品などが近くある場所では使用しないで下さい。水平で安定した場所で使用して下さい。エアコンの近くなど空気の流れが強い場所で使用する時は、本体・ガスポンペが過熱されないように十分注意して下さい。換気扇を回すなど換気にご注意下さい。長時間締め切った部屋で使用すると酸欠や酸素不足による不完全燃焼で一酸化炭素中毒の恐れがあります。火を付けたままで本体から離れないで下さい。使用者が本体から離れる場合は短時間であってもセフティーロックを『S'LOCK』側にして下さい。ガス漏れと思ったら、直ぐに火を消しガスポンペを外して下さい。窓などを開けて換気をして下さい。

フロントパネルとその周辺にシールなどを貼らないで下さい。


## 使用方法

### 電池の取り付け

- ・本体底面にある電池蓋を開け単3電池を入れて下さい。
- ・必ず電池蓋を閉めて下さい。蓋を閉めずに使用してしまうと感電する恐れがあります。

### ガスポンペの取り付け

- ・セフティーロックを『S'LOCK』側 (緑色が見える状態) にして下さい。
- ・ガスポンペにキャップがついている場合はキャップを外し、容器にある切込みを上にして容器ガイド (凸部) に合わせて下さい。
- ・ガスポンペをマグネットの方向に強く押し込んで下さい。
- ・ガスポンペと本体はマグネットによってしっかりと固定されます。着火後すぐに火力が弱くなってしまふ場合は、ガスポンペが正しく接続されていない可能性があります。ガスポンペを再度セットし直して下さい。

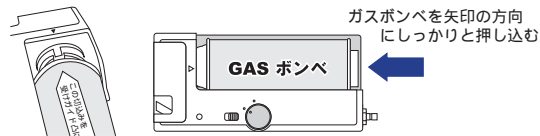

### 点火・消火する

- ・セフティーロックを『RELEASE』側 (赤色が見える状態) にして下さい。
- ・プッシュボタンを押すと点火します。

- ・着火している事を確認して下さい。着火していない場合はすぐにプッシュボタンから手を離し繰り返し点火操作をして下さい。

着火しない場合は『故障?と思ったら』をご覧ください。

- ・この状態から消火したい場合はプッシュボタンから手を離して下さい。
- ・炎を連続燃焼させる場合はプッシュボタンを押したまま右に回して下さい。
- ・連続燃焼状態から消火する場合は、プッシュボタンを左に回してから手を離して下さい。

### 火力を調節する

- ・本体側面にある火力調節ダイヤルを上側 (L側) に回すと火力が強くなり、下側 (S側) に回すと火力が弱くなります。
- ・火力が強すぎたり、弱すぎたりすると点火しない事や、点火後すぐに消えてしまう事があります。その場合は火力を調節して下さい。
- ・火力調節ダイヤルがどの位置でも炎が安定する訳ではありません。ガスポンペを交換した時や使い始める時はS側いっぱいに戻し最小の火力から徐々に大きくし作業しやすい火力にして下さい。

### 使用後の確認

- ・消火している事を確認して下さい。消火後は燃焼筒やフロントパネル、本体などが熱くなっていることがありますので注意して下さい。
- ・使用後は必ずセフティーロックを『S'LOCK』側にし、ガスポンペを外して本体内部の残留ガスを除去して下さい。(『残留ガスの除去方法』参照)
- ・長時間使用しない場合や箱などに収納する場合は安全のためガスポンペと電池を外して下さい。