

## アプト・スリー (APT-3)

### 【警告】

- (1)本体に布等燃えやすいものをかけないこと。
- (2)ガスバーナに着火する時、本体周囲に燃えやすい物・引火性の高い薬品等が無いことを確認すること。
- (3)予期せぬ出火が発生する恐れがあります。使用中に患者・使用者が火傷をしないように十分留意すること。
- (4)APT-3専用ガスポンペを使用すること。
- (5)ガスを充填する時、必ず電池を取り外し、プッシュボタンをロックした状態で行うこと。

### 【禁忌・禁止】

- (1)可燃性ガスを燃焼させ高温が発生します。歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士以外が操作しないこと。
- (2)可燃性ガス使用中に使用しないこと。また、可燃性ガス使用後も十分換気を行った後使用すること。

### 【使用上の注意】

- (1)ガス充填後5分間は着火しないこと。
- (2)燃焼筒及びその周辺は使用中に加熱される可能性があるため火傷等に注意すること。
- (3)着火後の炎がエアコン等の風の影響で本体を加熱しないよう注意すること。
- (4)着火用の火花で感電する可能性及び意図しない着火等で火傷する可能性があるため無闇に燃焼筒周辺を触れないこと。
- \* (5)ガスの充填にはAPT-3専用ガスポンペを使用すること。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

- (1)温度・湿度、ほこり等による悪影響が生じない場所に保管すること。
- (2)保管する場合は本体から電池を取り外すこと。
- \* (3)製品を廃棄処分する場合は本体からガスをすべて抜取り、乾電池を取り外し産業廃棄物として処分すること。

### 【包装】

1台/箱

### 【製造販売業者又は製造者の氏名又は名称及び住所等】

#### 1. 製造販売業者


株式会社 フェニックスデント  
〒158-0091 東京都世田谷区中町5-38-3 立昇苑  
TEL: 03-3702-8573  
FAX: 03-3702-8501  
許可番号: 13B3X00054

#### 2. 製造業者

株式会社 フェニックスデント 世田谷工場  
〒158-0091 東京都世田谷区中町5-38-3 立昇苑  
TEL: 03-3702-8573  
FAX: 03-3702-8501  
許可番号: 13BZ200377

必ず取扱説明書をお読み下さい

### \* 【形状・構造及び原理等】

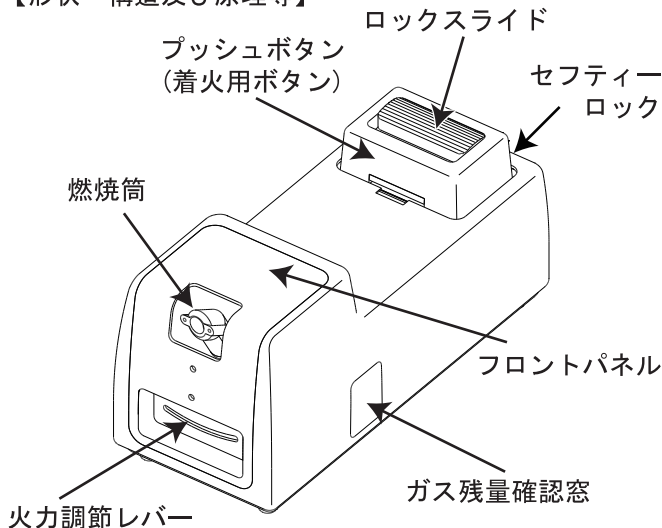

### 【使用目的、効能又は効果】

専用ガスポンペ(成分: ブタンガス等)を燃料とするバーナで、歯科用器具の加熱又は消毒に用いる。

### 【品目仕様】

- (1)ガス漏れが無いこと。
- (2)火力調整が適切にできること。

### 【操作方法又は使用方法等(用法・容量を含む)】

- (1)使用前に燃焼筒内にワックス等が詰まっていなことを確認する。
- (2)プッシュボタンのロックを解除する。
- (3)プッシュボタンを押し着火を確認する。連続燃焼をさせたい場合はプッシュボタンを押したままの状態プッシュボタンをロックする。
- (4)消火させる場合は、プッシュボタンから手を離す。また、連続燃焼の場合はプッシュボタンのロックを解除してからプッシュボタンから手を話す。
- (5)消火を確認し、プッシュボタンをロックする。