

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー (JMDN コード : 16350000)

ぷれバイト


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1) 歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
- 2) 本製品の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
- 3) 再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1) 形状・構造

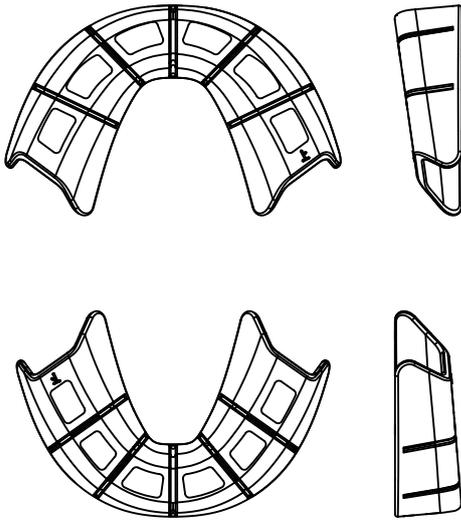

2) 原材料 : エチレンビニルアセテート (EVA)

【使用目的又は効果】

印象採得時に、印象材を盛り、保持し、圧接するために用いる。

【使用方法等】

- 1) 患者の口腔内のサイズ、形態、残存歯に合わせカットする。
- 2) 印象材を凹面に盛り圧接する。この時に本品咬合面に開いている穴から印象材があふれ出るようにし、咬合採得を同時に行う。
- 3) 印象材の硬化後、口腔内より取り出す。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・消毒を行うこと。
- 2) 切断して使用する場合、誤飲の恐れがあるので、使用する際は十分に注意すること。
- 3) 本品又は類似の成分に過敏症の既往歴がある術者は、本品を使用しないこと。また、本品又は類似の成分に過敏症の既往歴がある患者は、本品を使用しないこと。

- 4) 本品の使用や皮膚接触により、眼、皮膚、呼吸器、口腔内外に炎症やアレルギーが発症した患者又は術者は、使用をすぐに中止し、専門医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

1) 保管方法

直射日光を避け、清潔で高温多湿にならない場所にて保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

名称 : 株式会社フェニックスデント

住所 : 〒327-0024

栃木県佐野市亀井町 2649-3

電話番号 : 0283-25-8755

取扱説明書を必ずご参照下さい。