



ぷれバイト® 取扱説明書

機械器具68 印象採得又は咬合採得用器具
 一般医療機器 歯科印象採得用トレー
 (JMDN コード: 16350000)
 届出番号: 09B3X10010000003
 再使用禁止



株式会社 **フェニックスデント**

〒327-0024 栃木県佐野市亀井町2649-3
 TEL 0283-25-8755 FAX 0283-25-8756
 info@phoenix-dent.co.jp





注意事項

- ・ご使用前に必ず適切な**洗浄・消毒**をして下さい。
- ・**単回使用の製品**ですので、再使用はしないで下さい。
- ・使用中に脱落し誤飲しないように適切に固定してください。
 場合によっては糸で固定するなどしてください。
- ・本品又は類似の成分に過敏症の既往歴がある患者には使用をしないで下さい。
- ・保管状況によっては製品が多少白濁する場合がありますが性能に影響はございません。
- ・長期間(3年以上)の保管で変質している場合は使用せずに廃棄して下さい。
- ・歯科医師、歯科技工士以外が作業しないこと。

主な仕様

商品名 ぷれバイト
 材質 EVA樹脂
 保管条件 直射日光を避け、清潔で高温多湿にならない場所に保管・管理すること。
 寸法及び重量

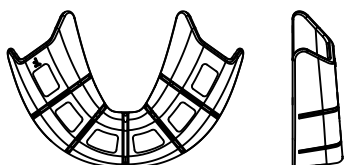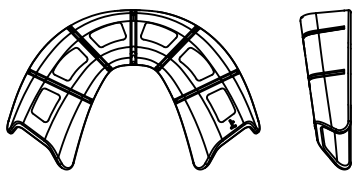

使用方法

操作説明は石膏模型で行いますが実際の診療では口腔内で行ってください。

ぷれバイトは滅菌されておりませんので適切に薬液などで消毒してください。

このような症例では



使用部位に合わせて
ハサミで切る



今回は矢印の
2カ所を使用します

床縁など干渉する
部位も切断します



シリコン印象材などをぷれバイトの
粘膜面側に盛り口腔内で圧接



シリコン印象材などを
咬合面側に追加します



患者に噛んで咬合高径を
合わせて硬化を待つ



完成